

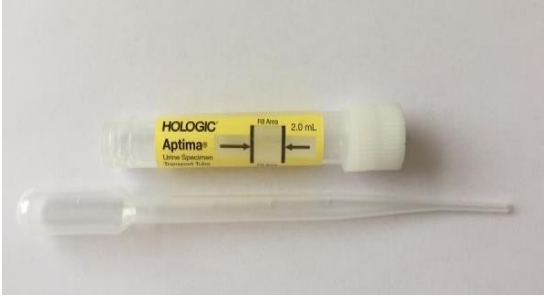




<p><b>Aptima Multitest kit</b></p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p>Herpes simplex</p> <p>Chlamydia &amp; gonokokker vaginal selvtagning</p> <p>Varenr. PRD-03546</p>	
<p><b>Aptima Unisex specimen collection</b></p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p>Herpes simplex</p> <p>Chlamydia &amp; gonokokker fra cervix, vagina, urethra, rectum, svælg og øjne</p> <p>Varenr. 301041</p>	
<p><b>Aptima Urine specimen collection kit</b></p> <p>Med engangspipette og prøverør til urin</p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p><b>Mænd</b></p> <p>Chlamydia &amp; gonokokker fra urin</p> <p>Varenr. 301040</p>	
<p><b>ESwab (HVID) med alm. podepind</b></p>	<p>Dyrkning og resistens samt virus PCR-analyser</p> <p>Varenr. 220245</p>	
<p><b>Urin-Monovette</b></p> <p>Prøverør med opsugningsspids</p>	<p>Forsendelse af urin til dyrkning</p> <p>Varenr. 10.252</p>	

<p><b>ESwab (GRØN) med tynd podepind (minitip + fleksibel)</b></p>	<p>Samme anvendelse som eSwab, men med mindre tip og fleksibel podepind</p> <p>Varenr. 220246</p>	
<p><b>FecalSwab med alm. podepind orange skruelåg</b></p>	<p>Til rektalpodninger</p> <p>&amp;</p> <p>Helicobacter Pylori (til denne skal indsendes fæces svarende til en ært)</p> <p>Varenr. 220258</p>	
<p><b>Ekspektoratdåse med plasticcontainer</b></p>	<p>Ekspektorater og vævsbiopsier</p> <p>Varenr. AL-450001-s</p>	 <p>1. Tag den inderste æske ud. 2. Skru det hvide låg af og placer ophøstet prøve i beholderen. 3. Skru låget på igen. 4. Placer æske eller den inderste beholder i den yderste.</p>
<p><b>Forsendelsescontainer til 2 objektglas</b></p> <p>&amp;</p> <p><b>Objektglas, facetslebne afr. hjørner</b></p>	<p>Analftryk for børneorm laves med klar tape, som sættes på objektglas med klæbesiden nedad.</p> <p><b>OBS – objektglas og forsendesetui bestilles separat</b></p> <p>Forsendelsesetui Varenr. 86.972</p> <p>Objektglas Varenr. 1510.1010</p>	

<p><b>Fæcesrør</b></p> <p>Prøverør med beskyttelsesrør</p>	<p>Fæces til undersøgelse for parasitter samt til forsendelse af kvitterede orm/ormeled til identifikation</p> <p>Varenr. 78.892.056</p>	
<p><b>Boblekuvert, 18x26 cm</b> <b>Mrk. Hvidovre</b></p>	<p>Præfrankeret boblekuvert til forsendelse af prøver</p> <p>Varenr. P1685.1826H</p>	
<p><b>Kun for afdelinger der selv har POCT-udstyr</b> <b>POCT analyser (UTM)</b></p>	<p>Podning til kørsel på POCT-udstyr lokalt i afdelingen</p> <p>Varenr. 77997</p>	

**Prøver sendes til:**  
Klinisk Mikrobiologisk afd.  
Hvidovre Hospital  
Kettegård Allé 30  
2650 Hvidovre  
Tlf. 38 62 24 29  
Vagthavende læge: 38 62 64 43,  
om aftenen via omstilling