

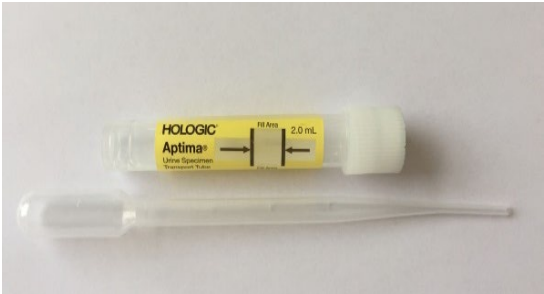
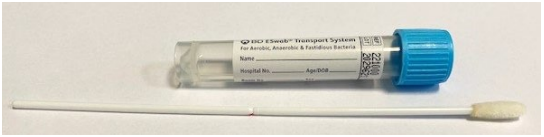


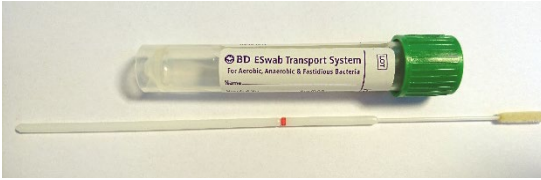
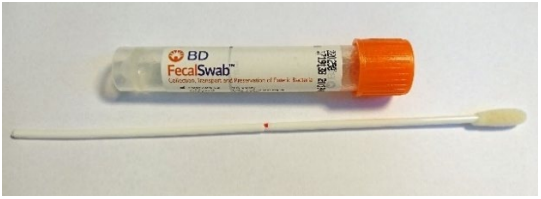



<p>Aptima Multitest kit</p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Corona, influenza, RS-virus, udvidet luftvejsvirus og adenovirus</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p>Herpes simplex</p> <p>Chlamydia & gonokokker vaginal selvtagning</p> <p>Varenr. PRD-03546</p>	
<p>Aptima Unisex specimen collection</p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p>Herpes simplex</p> <p>Chlamydia & gonokokker fra cervix, vagina, urethra, rectum, svælg og øjne</p> <p>Varenr. 301041</p>	
<p>Aptima Urine specimen collection kit</p> <p>Med engangspipette og prøverør til urin</p>	<p>Anvendes til:</p> <p>Mycoplasma genitalium</p> <p>Mænd</p> <p>Chlamydia & gonokokker fra urin</p> <p>Varenr. 301040</p>	
<p>ESwab (LYSEBLÅ) med alm. podepind</p>	<p>Dyrkning og resistens samt PCR-analyser (IKKE corona og andre luftvejsvirus)</p> <p>Varenr. 221000</p>	

<p>Alternativ til ESwab: Nest Disposable sampler (Lyserødt låg)</p>	<p>Dyrkning og resistens samt PCR-analyser (IKKE corona og andre luftvejsvirus)</p> <p>Varenr. ND201007</p>	
<p>Urin-Monovette</p> <p>Prøverør med opsugningsspids</p>	<p>Forsendelse af urin til dyrkning</p> <p>Varenr. 10.252</p>	
<p>ESwab (GRØN) med tynd podepind (minitip + fleksibel)</p>	<p>Samme anvendelse som eSwab, men med mindre tip og fleksibel podepind</p> <p>Varenr. 221003</p>	
<p>FecalSwab med alm. podepind orange skruelåg</p> <p>Alternativ til FecalSwab: InVitro Fecal Transwab (koboltblåt låg)</p>	<p>Til rektalpodninger & Helicobacter Pylori (til denne skal indsendes fæces svarende til en ært)</p> <p>Varenr. 220258</p> <p>Varenr. MW-MW168S</p>	 

<p>Ekspektoratdåse med plasticcontainer</p>	<p>Ekspektorater og vævsbiopsier</p> <p>Varenr. AL-450001-s</p>	 <p>1. Tag den inderte gule ud 2. Skru det hvide låg af og placer opbevaringsprøve i beholderen. 3. Skru låget på igen. 4. Placer enten den inderte beholder i den yderste.</p>
<p>Forsendelsescontainer til 2 objektglas</p> <p>&</p> <p>Objektglas, facetslebne afr. hjørner</p>	<p>Anaftryk for børneorm laves med klar tape, som sættes på objektglas med klæbesiden nedad.</p> <p>OBS – objektglas og forsendesetui bestilles separat</p> <p>Forsendelsesetui Varenr. 86.972 Objektglas Varenr. 2510.1010</p>	
<p>Fæcesrør</p> <p>Prøverør med beskyttelsesrør</p>	<p>Fæces til undersøgelse for parasitter samt til forsendelse af kvitterede orm/ormeled til identifikation</p> <p>Varenr. 78.892.056</p>	
<p>Boblekuvert, 18x26 cm Mrk. Hvidovre</p>	<p>Præfrankeret boblekuvert til forsendelse af prøver</p> <p>Varenr. P1685.1826H</p>	 <p>Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 - 2650 Hvidovre</p> <p>BIOLOGISK STOF KATEGORI B</p> <p>UN3373</p> <p>KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, AF/SN: 445 ++ + 10073 - ++ 0892 SJÆLLAND UNF P</p>

Hologic rør (gråt låg)	Podning til undersøgelse for Corona . Varenr. PRD-06554 Podepind: Meditec pind 4053	
Kun for afdelinger, der selv har POCT-udstyr POCT-analyser - ESwab (LYSEBLÅ) med alm. podepind Alternativt: Nest rør (Se ovenfor)	Podning til kørsel på POCT-udstyr lokalt i afdelingen Varenr. 221000	

Prøver sendes til:

Klinisk Mikrobiologisk afd.
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf. 38 62 24 29

Vagthavende læge: 38 62 64 43,
om aftenen via omstilling