


Fremstilling af malariastryg


Materiale: 4 objektglas med skrivefelt, et ekstra objektglas til udstryg, forsendelsesetui, engangslancet, spritserviet

Klargøring af objektglas: Rekvisionsnummer påsættes alle 4 objektglas. Alternativt påføres CPR nummer med blyant.

Fremstilling af stryg: Huden desinficeres og lufttørres inden punkturen. Med engangslancet prikkes i øreflippen eller lateralt på fingerens yderstykke mellem neglevold og pulpa. Hos små børn kan hælen også anvendes. Første bloddråbe aftørres. Der fremstilles herefter 2 dråbepræparater og 2 udstrygningspræparater:

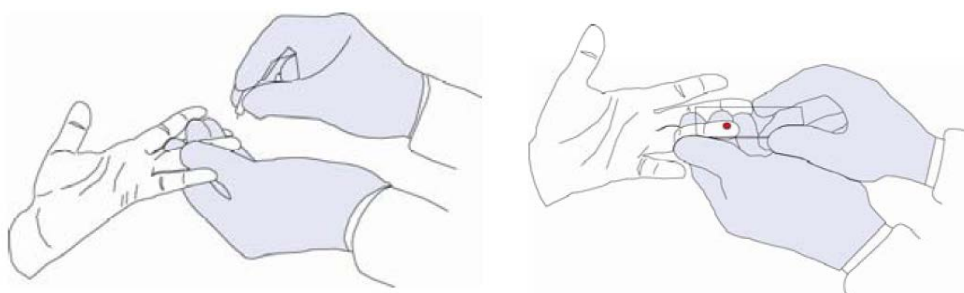

Dråbepræparater: Midt på 2 objektglas anbringes 2-4 bloddråber, der straks spredtes med enden af et objektglas til et kvadrat på ca. 1 cm². Den spredte bloddråbe skal have en tykkelse, så trykt skrift lige netop kan læses igennem præparatet.

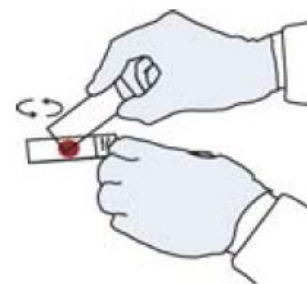

Udstrygningspræparater: En bloddråbe afsættes nær den ene ende på et objektglas. Et ekstra objektglas anbringes med den korte ende i en vinkel på 45 grader med objektglasset, sådan at dråben befinder sig mellem de to glas. Lad blodråben fordele sig langs enden af objektglasset og udstryg herefter blodet med enden af det ekstra objektglas med en jævn bevægelse som vist på nedenstående figur. Der laves 2 udstryg.

