

Hvidovre, den 8. maj 2026

Information til Praksis vedr. podepind i Conest-rør

Podepinden med 2 knæk i Amies podesæt/Conest meditec (blåt låg) giver problemer i vores analyseudstyr

Podepinden med 2 knæk (se billede) i Amies podesæt/Conest meditec røret skaber problemer i vores analyseudstyr her på Klinisk Mikrobiologisk afdeling, der fejler, hvis podepinden er for lang.

Det drejer sig om varenr. *5154 med podepinde med 2 knæk:*



Podesættet kan ikke længere bestilles og vi anbefaler, at I bruger **eSwab (varenr. 221000)** i stedet.

Hvis I har Conest podesæt (podepind med 2 knæk) på lager, som I gerne vil bruge op, beder vi jer om at knække podepinden i det laveste knæk (grønne pil), når I kommer den i poderøret.

Vores udstyr vil så kunne håndtere prøven uden fejl.

Conest podesættet findes også med en podepind med kun ét knæk – denne giver ikke problemer.

På forhånd mange tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Amager og Hvidovre Hospital